

新規実施項目のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目を新たに受託開始いたしますので、
ご利用いただきたくご案内申し上げます。

今後とも引き続きお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具



〈実施日〉

平成 27 年 11 月 2日 (月) ご依頼分より

新規検査項目	男性 AICS (5種)
	女性 AICS (6種)

▼ 今回の新規項目受託開始に伴い、下記項目の受託を中止させていただきます。

項目名	受託中止予定日
男性 AICS (4種)	平成27年12月18日(金) ご依頼分をもって受託中止。
女性 AICS (5種)	
女性 AICS (2種)	

外注先 SRL



(株)ジャパメディカル

山梨県中央市乙黒354-1
TEL 055(220)4155代表

●男性 AICS (5種) ●女性 AICS (6種)

「アミノインデックス技術」を用いたがんリスクスクリーニング検査に、新たな解析対象として「膵臓がん」を追加いたしました。

健常者における血液中のアミノ酸濃度は、それぞれ、一定に保たれるようにコントロールされていますが、がん患者では一定に保たれている血液中のアミノ酸濃度のバランスが変化することが報告されています。

AICS® (エーアイシーエス) は、血液中のアミノ酸濃度を測定し、健常人とがん患者のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんに罹患しているリスクを評価する検査です。

このたび、新たな解析対象に早期発見が課題とされる「膵臓がん」を加え、より広いがん種を一度に検査できるようになりました。

●各AICS®の解析対象となるがん種

男性AICS (5種) : 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん

女性AICS (6種) : 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん (子宮頸がん・子宮体がん) ・卵巣がん*

*子宮がん・卵巣がんは、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんを対象としています。いずれのがんであるリスクについて評価することができますが、それぞれのがんのリスクについて区別することはできません。

●検体採取方法

1. EDTA-2Na入り採血チューブにて血液約 5 mLを採取してください
2. 採血直後、血液を 2 ~ 3 回軽く転倒混和してください (ローラーでの混和は行わないでください)
3. 混和後直ちに (1分以内) 採血チューブを氷水中 (血液の液面まで氷水につかる状態) で冷却 (15 分間以上、遠心操作まで冷却) してください
4. 採血から8時間以内に冷却条件で遠心分離 (4℃、3,000回転、15分) または通常遠心分離 (3,000回転、15分、ローターが昇温していないこと) してください
5. 遠心後、直ちに上清の血漿を血液との界面に触れないように血漿上清の中央部から採取し、分注してください
6. 分注後、血漿を 4 時間以内に凍結保存してください

●AICS®の受託における注意点

・AICS®は下記年齢の日本人 (妊娠されている方を除く) を対象として開発された検査です。これらの方以外の AICS 値は評価対象外となります。ご依頼の際は、性別・年齢を必ず明記してください。

対象がん	対象年齢
胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん	25 歳～90 歳
前立腺がん	40 歳～90 歳
子宮がん (子宮頸がん・子宮体がん) ・卵巣がん	20 歳～80 歳

- ・検査前 8 時間以内に、水以外 (食事、サプリメント等) は摂らないで、午前中に採血してください。
- ・検査時に妊娠されている方、授乳中の方、がん患者 (治療中を含む) の方、先天代謝異常の方、透析患者の方は、AICS 値に影響がありますので検査は受けられません。
- ・血漿 (EDTA-2Na) 以外の材料は、受託できません。