

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
 このたび、下記の検査項目の受託を開始することとなりましたので  
 ご案内申し上げます。

敬具




記

〈受託開始日〉

平成 28 年 11 月 24 日 (木) ご依頼分より

コード	項目名	検体量	容器	基準値	所要日数	実施料	備考
0738	百日咳菌DNA	後鼻腔 ぬぐい液	フロックワフ + 滅菌 ポリスビツ	陰性	2~4日	360点	後鼻腔 ぬぐい液は、必ずフロックワフで採取し、滅菌ポリスビツにスワフを入れて凍結保存して下さい。他項目との重複は避けて下さい。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。
						判断料	
						150点 微生物学的	

外注先 SRL

検査項目		保存
百日咳菌DNA		凍結
採取方法		
1. 綿球部分に触れないように、スワブの軸部分をつまんで取り出します。		
	2. 被験者の頭を動かさないようによく押さえ、その後、スワブを後鼻腔に静かに挿入して粘液を採取します。	
	3. 速やかにスワブを滅菌ポリスピッツ (ARR) の中に入れ、スワブの柄にあるスリットを容器の縁にあてて折ります。	
	4. スワブを入れたまま容器のキャップをしっかりと閉め、凍結保存にて提出してください。	