

新規実施検査項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび下記検査項目におきまして、新たに受託開始しますので、
ご利用いただきたくご案内いたします。

敬具

記

■ 受託開始日

平成 29 年 12 月 20 日 (水) ご依頼分より

■ 新規項目内容


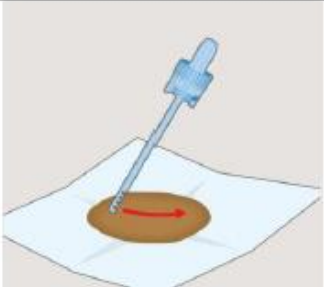
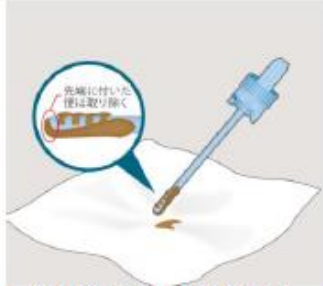
項目コード	検査項目	検体量	容器	実施料 判断料	所要日数	基準値 (単位)	備考
0829	便中カルプロテクチン	糞便	専用	276点 免疫学的	3~7	50.0以下 潰瘍性大腸炎の内視鏡的 非活動状態のカットオフ値 300以下 (mg/kg)	他項目との 重複依頼は 避けてくださ い。

外注先 SRL

● 便中カルプロテクチン〔FEIA〕

炎症性腸疾患の診断補助、潰瘍性大腸炎の病態把握に有用な腸管炎症マーカーです。便中カルプロテクチンは、腸管の炎症度を反映する非侵襲性のマーカーです。これまで、保険適用範囲は「潰瘍性大腸炎の病態把握の補助」に限られていましたが、FEIA法で測定した場合、「慢性的な炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病等）の診断補助」としても使用可能となりました。炎症性腸疾患が疑われる症例について腸管炎症の有無を判別することで、より効率的な内視鏡検査の実施および診断に貢献することが期待されています。

▼専用容器の取り扱い方法

容器形態	検査項目	保存
F30 旧容器記号 d3 	便中カルプロテクチン〔FEIA〕	凍結
	採取方法	
	 <p>1. キャップの青色部分を押さえながら、その上の水色部分を左に回し、スティックを引き抜きます。</p>	 <p>2. スティック先端の4つの溝が、十分に埋まるように便をこすり取ります。</p>
	 <p>3. スティックの先端についた便をトイレトペーパー等で取り除きます。</p>	 <p>4. スティックを容器に差し込み、キャップの水色部分が青色部分にカチッとハマるまで右に回します。</p>
内容 トリス緩衝液 BSA アジ化ナトリウム (0.1%以下) 貯蔵方法 冷蔵 有効期間 1年	●注意事項 容器中の保存液が、目や口に入ったり皮膚に付着したりしないようご注意ください。誤って付着した場合は水で十分に洗い流してください。	